

URSEC[®] FEMENINO ANTI-REFLUJO

¡MUCHO MÁS PRÁCTICO QUE UN SANITARIO DE CAMA!

ERGONÓMICO

ECONÓMICO

ESTERILIZABLE A 130°C



DE USO SENCILLO

FÁCIL DE LIMPIAR

REUTILIZABLE

Para comprender bien el funcionamiento del anti-reflujo del **URSEC Femenino**, cuyo contenido útil (1 litro) no se puede derramar, véanse las instrucciones de uso **URSEC (Hombre/Mujer)**.

INSTRUCCIONES DE USO DE LA TULIPA FEMENINA

⇒ **MONTAJE:** ajustar la tulipa en el anti-reflujo verde del **URSEC** después de haberla orientado correctamente, tal y como aparece en la figura.

⇒ **POSICIONES DE USO PARA LA MUJER**


a/ En una cama clásica :

- 1/ Tumbada o sentada, con las piernas ligeramente abiertas
- 2/ Tumbada o sentada, con una pierna en la cama y la otra colgando
- 3/ Sentada en el borde de la cama, con las piernas ligeramente abiertas

b/ En un colchón anti-escaras (muy blando):

Es preferible usar el **URSEC Femenino** en las posiciones 2/ y 3/

c/ De pie, o sentada en el borde de un asiento (silla de ruedas).

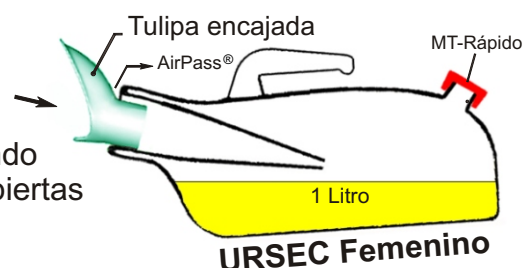

⇒ **INCLINACIÓN DEL URSEC:** debe presentar una pendiente suficiente como para que la orina discurra por acción de la gravedad. No conviene mantener el **URSEC** en posición vertical, ya que impediría la salida del aire.

⇒ **COLOCACIÓN DEL URSEC FEMENINO:** la tulipa debe cubrir totalmente la zona íntima de la mujer, quedando bien ajustada a la piel para conseguir un contacto hermético. Durante la micción, el aire sale a través del AirPass[®].

⇒ **DESPUÉS DE LA MICCIÓN:** aplicando la tulipa contra la piel, desplazarla hacia arriba, manteniendo el **URSEC** inclinado para facilitar el escurrimiento de las últimas gotas de orina.

⇒ **VACIADO:** retirar el tapón del MT-Rápido situado en la parte posterior del **URSEC** e inclinar totalmente el mismo para vaciarlo.

Limpieza y esterilización del URSEC FEMENINO

Conviene limpiar el **URSEC** femenino antes y después de cada uso : separar la tulipa, desenroscar el anti-reflujo verde y el tapón del MT-Rápido. Lavar todas las partes con agua fría y lejía u otro desinfectante. Compatible con sistemas lavadores de orinales. Fabricado en polipropileno, **URSEC** también puede ser esterilizado en autoclave a una temperatura de 130° C (excepto el tapón de seguridad) o con óxido de etileno.

Producto exclusivo de **GOUGET[®]** (Francia) - www.gouget.com
- Patentes en 21 países -

Distribuido por: