

URSEC® FÉMININ ANTI-REFLUX

BEAUCOUP PLUS PRATIQUE QU'UN BASSIN !

ERGONOMIQUE

ÉCONOMIQUE

STÉRILISABLE A 130°C



FACILE D'EMPLOI

SIMPLE A NETTOYER

RÉUTILISABLE

Pour une bonne compréhension du fonctionnement de l'anti-reflux de l'urinal **URSEC** féminin dont le contenu (1 litre) ne peut se répandre, se référer à notre notice **URSEC** (Homme/Femme).

MODE D'UTILISATION DE LA TULIPE FÉMININE®

⇒ **MONTAGE:** emboîter la poignée dans un sens ou dans l'autre puis insérer la tulipe dans l'anti-reflux vert d'**URSEC** après avoir convenablement orientée celle-ci telle que représentée sur le dessin.


⇒ **POSITIONS D'UTILISATION POUR LA FEMME:**

a/ Sur un lit classique:

- 1/ Allongée ou assise, les jambes légèrement écartées
- 2/ Allongée ou assise, une jambe sur le lit, l'autre pendante
- 3/ Assise sur le bord du lit, les jambes légèrement écartées

b/ Sur un matelas anti-escarres (très mou): plutôt utiliser **URSEC** féminin dans les positions 2/ et 3/ (pente).

c/ Debout, ou assise sur le bord d'une fauteuil (roulant).

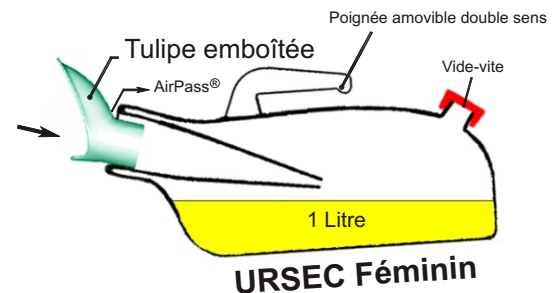

⇒ **INCLINAISON DE L'URSEC:** il doit offrir une pente suffisante pour que l'urine s'écoule par gravité. Ne pas relever **URSEC** jusqu'à la verticale, l'air ne partirait plus.

⇒ **MISE EN PLACE DE L'URSEC FÉMININ:** Sa tulipe doit exactement coiffer le sexe et être appliquée autour, contre la peau, de façon jointive pour une liaison étanche. Pendant la miction, l'air s'échappe par l'AirPass®.

⇒ **APRES LA MICTION:** continuer à appliquer la tulipe en la faisant glisser vers le haut contre la peau pour faciliter l'écoulement des dernières gouttes, tout en maintenant **URSEC** incliné.

⇒ **VIDANGE:** dévisser le bouchon du Vide-vite® situé à l'arrière et incliner totalement **URSEC** pour vider.

Nettoyage et stérilisation de l'URSEC FÉMININ

Nettoyer votre **URSEC** féminin avant et après utilisation.

A cet effet, déboîter la tulipe, dévisser l'anti-reflux vert et le bouchon du Vide-vite puis rincer l'ensemble à l'eau froide + Javel ou avec un désinfectant. Compatible lave-bassins.

Etant en polypropylène, il est également stérilisable en autoclave à 130°C ou à l'oxyde d'éthylène.

Une fabrication exclusive **GOUGET®** 3, Rue d'Auteuil 75016 Paris France

Tel +33 (0)1 42 88 57 84 - Fax +33 (0)1 45 24 45 01 - www.gouget.com

- Brevets, Marques et Modèles déposés -

EN VENTE CHEZ LES REVENDEURS MÉDICAUX ET EN PHARMACIE

DEMANDEZ URSEC URINAL ANTI-REFLUX POUR HOMME:

CODE A.C.L. 715 1512

URSEC URINAL ANTI-REFLUX POUR FEMME: CODE A.C.L. 715 1512 + CODE A.C.L. 769 0841

TULIPE FÉMININE® (S'EMBOÎTE DANS L' URSEC HOMME): CODE A.C.L. 769 0841

(fixé sur le côté du lit) PORTE-URINAL UNIVERSEL POUR URSEC (Homme ou Femme) :

CODE A.C.L. 715 1529