

URSEC® FÜR FRAUEN MIT RÜCKFLUSSSICHERUNG

VIEL PRAKTISCHER ALS EIN BECKEN !

ERGONOMISCH

WIRTSCHAFTLICH

BEI 130°C STERILISIERBAR



LEICHT ZU


LEICHT ZU REINIGEN

WIEDERVERWENDB

Um die Rückflusssicherungsfunktion des Urinals **URSEC** für Frauen gut zu verstehen, dessen Inhalt (1 Liter) nicht auslaufen kann, lesen Sie bitte unsere Gebrauchsanweisung **URSEC** (für Männer/Frauen).

VERWENDUNG DES EINSATZES FÜR FRAUEN

- ⇒ **MONTAGE:** Den Einsatz in die grüne Rückflusssicherung des **URSEC** stecken, nachdem er wie auf der Zeichnung dargestellt richtig ausgerichtet wurde.
- ⇒ **MÖGLICHE POSITIONEN FÜR DIE VERWENDUNG FÜR FRAUEN**
- a/ Auf einem klassischen Bett:
- 1/ Liegend oder sitzend mit leicht gespreizten Beinen
 - 2/ Liegend oder sitzend, ein Bein auf dem Bett, das andere aus dem Bett hängend
 - 3/ Auf dem Bettrand sitzend mit leicht gespreizten Beinen
- b/ Auf einer (sehr weichen) speziellen Matratze gegen Durchliegen: **URSEC** für Frauen nur in den Positionen 2/ und 3/ oder in der Position 1/, dann aber
- c/ Stehend oder auf dem Rand eines Stuhls (Rollstuhls) sitzend.
- ⇒ **NEIGUNG DES URSEC:** Auf der Matratze muss stets auf **A** gedrückt werden, damit die Neigung ausreicht, dass der Urin durch die Schwerkraft durch den Einsatz und die grüne Rückflusssicherung fließt. **Das URSEC niemals ganz senkrecht halten, da so die Luft nicht mehr entweichen würde.**
- ⇒ **ANSETZEN DES URSEC FÜR FRAUEN:** Sein Einsatz muss genau die Schamlippen bedecken und darum fest gegen die Haut gedrückt werden, so dass er völlig dicht abschließt.
- ⇒ **NACH DEM URINIEREN:** Den Einsatz weiter andrücken, ihn dabei an der Haut nach oben schieben, so dass die letzten Tropfen abfließen können, dabei das **URSEC** geneigt halten. Bei der ersten Benutzung eventuell das Laken mit einer Gummiunterlage schützen.
- ⇒ **ENTLEERUNG:** Den Verschluss der Schnellentleerung hinten aufschrauben und das **URSEC** völlig geneigt Halten, um es zu entleeren.

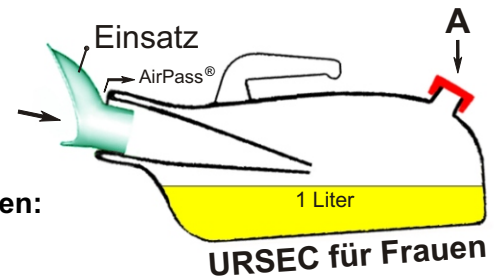

Reinigung und Sterilisierung des URSEC FÜR FRAUEN

Ihr **URSEC** für Frauen vor und nach der Benutzung reinigen. Hierzu den Einsatz herausnehmen, die Rückflusssicherung und den Verschluss für die Schnellentleerung abschrauben, dann alles in kaltem Wasser und Chlor-Wasser oder einem Desinfektionsmittel ausspülen.

URSEC für Frauen kann auch in der Reinigungsvorrichtung für Becken gereinigt werden. Da es aus Polypropylen besteht, ist es auch bei 130°C im Autoklav oder mit Ethylenoxid sterilisierbar.

Ein Exklusiv-Fabrikat **GOUGET®** 3, Rue d'Auteuil 75016 Paris France
Tel +33 (0)1 42 88 57 84 - Fax +33 (0)1 45 24 45 01 - www.gouget.com
- Patente, Marken und Modelle angemeldet -

ERHÄLTLICH BEI: