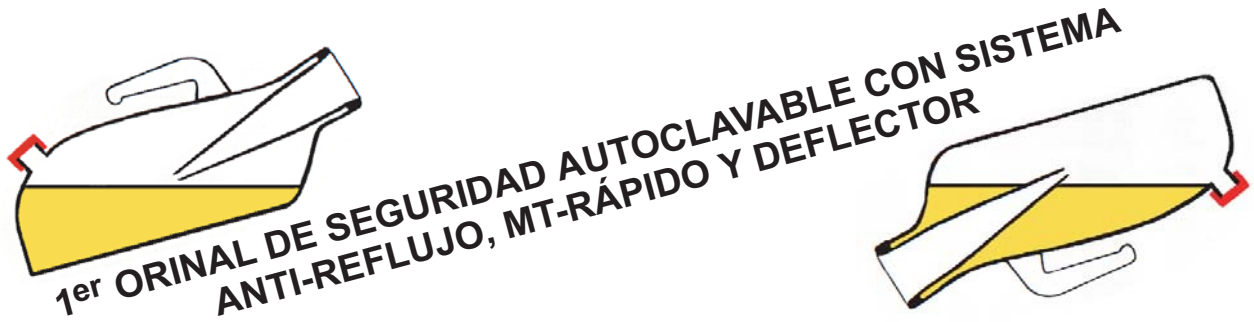


**HOMBRE****URSEC®****MUJER****ORINAL CON SISTEMA ANTI-REFLUJO, MT-RÁPIDO Y DEFLECTOR****EL ÚNICO QUE SIN TAPA E INCLUSO BOCA ABAJO, RETIENE SU CONTENIDO DE HASTA 1 LITRO**

- ⇒ **SEGURIDAD ABSOLUTA** : el anti-reflujo de rosca no se desencaja accidentalmente. Fácil de limpiar (lejía).
- ⇒ **PRÁCTICO** : ¡ sin tapa manchada y molesta que quitar ! Se puede usar inmediatamente.
- ⇒ **CUERPO TRANSPARENTE** : control visual instantáneo (limpieza, nivel, aspecto del contenido).
- ⇒ **EFICAZ AL 100%** : contiene hasta 1 litro sin rebosar sea cual sea la posición, aún cuando se vuelca.
- ⇒ **URSEC NO TIENE TAPA** : no hay confinamiento de orina ni emanaciones de malos olores al abrirlo.
- ⇒ **HECHO DE POLIPROPILENO HIPOALERGÉNICO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE Y REUTILIZABLE.**

**VENTAJAS PARA EL PACIENTE**

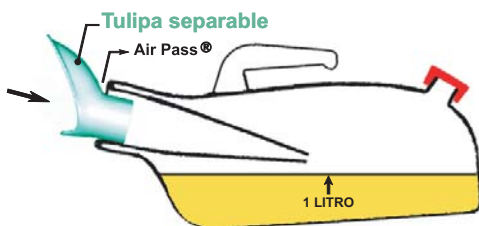
- No importa si al dormir el paciente se mueve en la cama : el **sistema anti-reflujo** mantiene las sábanas secas.
- **URSEC** se utiliza sin riesgos, incluso en la oscuridad. Su vaciado se realiza por el **MT-Rápido** (provisto de 2 tapones).
- Para obtener el MT-Rápido utilizar : - el tapón de rosca especial que se desenrosca normalmente ó - el tapón de seguridad diseñado para impedir cualquier apertura inoportuna.
- El diseño de **URSEC** permite una entrada más inclinada y accesible (**sin tapa que retirar**).
- Capacidad útil aproximada de un litro. Con **URSEC** en la cama, se puede dormir tranquilo y con toda confianza.
- **URSEC** tiene un mango ergonómico amovible que resulta muy cómodo a los usuarios.

**VENTAJAS PARA EL ESTABLECIMIENTO**

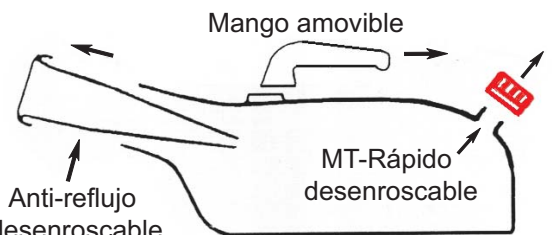
- **SEGURIDAD** incluso si vuelca. **URSEC**, aún sin tapa, gracias a su **ANTI-REFLUJO**, no puede verter su contenido útil.
- Evita manchar las camas (escaras...) y cambiarse de ropa. Impide la salida de microbios y disminuye el riesgo de infecciones nosocomiales. Permite ahorrar en gastos de limpieza y desinfección.
- De noche, los **URSEC** se pueden dejar a mano en la cama, para que los pacientes no tengan que llamar para pedir ayuda.
- Cerrados un 96%, los **URSEC** no desprenden prácticamente ningún olor. Su uso es silencioso. Los **URSEC** son reutilizables.
- Fabricados en plástico reciclable, los **URSEC** tienen una discreta transparencia, lo que permite ver el nivel de llenado.
- **URSEC** cuenta con un diseño agradable. Graduado. Dos **URSEC** reemplazan al envase de recogida de 24 horas.
- Lavables con agua y lejía o desinfectante, o también con sistemas lavadores de orinales. Esterilizables en autoclave a 130°C.
- El cuello del MT-Rápido permite tomar muestras y realizar un vaciado seguro y orientado, sin desprendimiento de olores.
- ¡ Tres lavados de sábanas, pijamas y mantas "evitados" gracias al URSEC, bastan para ahorrarse el coste de la compra !  
A mayores, permite ganar tiempo evitando numerosos cambios de ropa de cama y baño de los pacientes.

**URSEC : LIMPIEZA ASEGURADA****MEJORANDO LA HIGIENE DE LOS CENTROS DE CUIDADOS, URSEC CONTRIBUYE A SU ACREDITACIÓN****INSTRUCCIONES DE USO**

Limpiar los URSEC antes y después de cada uso.  
Se utilizan en la cama, horizontalmente o con leve pendiente.  
Deben ser siempre utilizados con el cono anti-reflujo verde roscado.  
Deben ser vaciados antes de que el contenido alcance la marca de 1 litro.  
El material de polipropileno no se amarillenta y la orina no se adhiere.  
No más orinales opacos que con el tiempo cogen un color dudoso.  
Basta con un enjuague para que los URSEC queden claros.

**URSEC + TULIPA = URSEC FEMENINO****Vaciado seguro y bien orientado (MT-Rápido)****LIMPIEZA - ESTERILIZACIÓN**

Para URSEC Femenino : separar la tulipa.  
Luego, para ambos modelos :  
Separar el ANTI-REFLUJO y el MT-Rápido,  
lavar todo con agua fría y lejía  
o desinfectante, con o sin lava-orinales.  
Esterilizable en autoclave a 130° C  
(salvo el tapón de seguridad) o tratar todo  
el sistema con óxido de etileno.  
Enroskar el ANTI-REFLUJO y el MT-Rápido.

**URSEC PARA HOMBRE****¡3 "ACCIDENTES" EVITADOS AHORRAN EL COSTE DEL URSEC: CON EL USO ES EL MÁS BARATO!****LIMPIEZA ASEGURADA**