

MANN**URSEC®****FRAU****URINAL MIT RÜCKFLUSSSCHUTZ, MTQUICK® UND DEFLEKTOR**

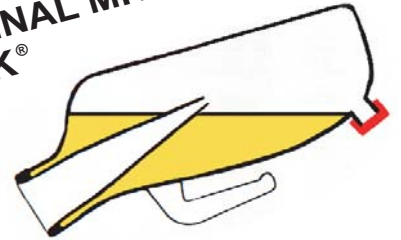
Das einzige Urinal ohne Deckel oder Verschluss, das in allen möglichen Positionen eine Kapazität von bis zu 1 Liter Inhalt hat

WARUM URSEC VERWENDEN ?

- ➔ **ABSOLUTE SICHERHEIT** : verschraubbarer Rückflußschutz, keine Gefahr des Auslaufens. Leicht zu reinigen (mit Chlorwasser)
 - ➔ **PRAKTISCH** : verschmutzte und platzraubende Deckel oder Verschlüsse müssen nicht entfernt werden. Sofort verwendbar.
 - ➔ **URSEC IST DURCHSICHTIG** : sofortige visuelle Kontrolle des Inhalts möglich (Sauberkeit, Menge).
 - ➔ **100% EFFIZIENT** : Kapazität bis zu 1 Liter in allen möglichen Positionen, selbst beim Umfallen.
 - ➔ **KEIN VERSCHLUß ODER DECKEL** : daher keine Urinreste oder Geruchsbelästigung beim Abschrauben.
- HERGESTELLT AUS LEICHT ZU HANDHABENDEM PROPYLEN, STERILISIERBAR IM AUTOKLAVEN UND WIEDERVERWENDBAR.**



DAS ERSTE AUTOKLAVIERBARE SICHERHEITSURINAL MIT RÜCKFLUSSSCHUTZSYSTEM UND MTQUICK®

**VORTEILE FÜR DEN BETTLÄGERIGEN**

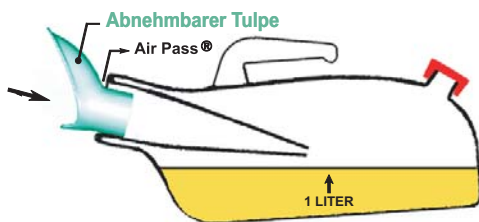
- Wenn **URSEC** beim Schlafen im Bett umkippt, bleibt das ohne Konsequenzen : Mit dem Rückflußschutz **bleibt die Bettwäsche trocken**.
- **URSEC** kann ohne Risiko auch im Dunkeln gehandhabt werden. Das Entleeren erfolgt über den **MTQUICK®** Ausguß.
- Verschließbar durch den: - **Standard-Schraubverschluss**, der einfach aufgeschraubt wird,
- **Sicherheits-Schraubverschluss**, so konzipiert, daß er nicht unabsichtlich geöffnet werden kann
- Mit dem **URSEC**-Konzept ist der Flaschenhals geneigter und **immer verwendungsbereit** (kein Stopfen abzuziehen).
- **Der Nutzinhalt beträgt ungefähr 1 Liter**. Mit **URSEC** im Bett zur Hand kann man in aller Ruhe schlafen.
- **Um die Handhabung von URSEC noch zu vereinfachen, verwenden die Benutzer gerne den abnehmbaren ergonomischen Handgriff.**

VORTEILE FÜR DIE PFLEGEINRICHTUNG

- **Sicherheit**: Dank Rückflußschutz ist selbst beim Umkippen ein Auslaufen bei **URSEC** nicht möglich. Verhindert verschmutzte Bettwäsche (Wundliegen), häufiges Wechseln. **Mikroben verbreiten sich nicht mehr, vermindertes Risiko nosomikaler Infektionen. Einsparungen beim Bettwäschewaschen und Desinfizieren. URSEC ist wiederverwendbar.**
- Während der Nacht bleibt **URSEC** ohne Risiko im Bett der Bettlägerigen.
- Da **URSEC** zu 96% verschlossen ist, wird kaum Geruch freigesetzt. Der Gebrauch ist **geräuscharm**.
- Aus wiederverwendbarem Plastik hergestellt, sind die **URSEC** diskret durchsichtig, sodaß das Füllniveau einfach abgelesen werden kann.
- Die **URSEC** haben ein gefälliges Design. Da sie graduiert sind, können zwei **URSEC** wie ein 24Std.- Behälter eingesetzt werden.
- Sie sind waschbar (Chlorwasser oder Desinfektionsmittel) mit oder ohne Flaschenspüler und können im **Autoklaven bei 130°C** sterilisiert werden.
- Der Ausguß des **MTQUICK®** ermöglicht die Entnahme von Proben und ein sauberes Entleeren ohne Geruchsentwicklung.
- Drei Bettlaken- Schlafanzug- und Bettdeckenwechsel, die durch den Einsatz von **URSEC** vermieden wurden, reichen bereits dazu aus, den Kaufpreis zu amortisieren.

URSEC: IHRE VERSICHERUNG FÜR DIE SAUBERKEIT**DURCH DIE VERBESSERUNG DER HYGIENE IN DEN PFLEGEINRICHTUNGEN HILFT URSEC BEI DER QUALITÄTSSICHERUNG****BENUTZUNG**

Die **URSEC** werden nicht sterilisiert geliefert. Vor Gebrauch sterilisieren.
Die **URSEC** werden flach im Bett oder von Hand mit einer leichten Neigung eingesetzt.
Sie müssen immer mit dem aufgeschraubten Rückflußschutzkonus benutzt werden.
Sie müssen entleert werden, bevor die Inhaltsanzeige einen Liter anzeigt.
Nach dem Ausspülen werden die **URSEC** wieder durchsichtig.
Schluß mit den undurchsichtigen Urinflaschen mit undefinierbaren Farben!

**URSEC + TULPE = URSEC FÜR FRAUEN**

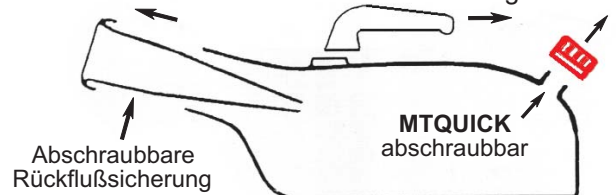
Luft einlaß

Entleerung mit dem **MTQuick****SÄUBERUNG - STERILISIERUNG****URSEC für Frauen**: Nehmen Sie die abnehmbare Tulpe ab.

Für beide Modelle:

Rückflußschutz und **MTQuick** aufschrauben.
Zuerst mit klarem Wasser, dann entweder mit Chlorwasser oder einem Desinfektionsmittel ausspülen.
Sterilisieren im Autoklaven bei 130°C oder Gassterilisation mit Ethylenoxyd ist möglich.
Rückflußschutz und **MTQuick** wieder aufschrauben

Abnehmbarer Handgriff

**URSEC FÜR MÄNNER****3 Unfälle vermieden .. und der Kauf von URSEC hat sich gelohnt : URSEC hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis !**

- 3 Mal Bettwäsche-, Schlafanzug- und Bettdeckenwechsel, und Sie haben den Preis von **URSEC** amortisiert ! Danach sparen Sie weiter und haben die Hygiene zusätzlich. In Krankenhäusern, Kliniken, Seniorenheimen oder zu Hause bedeutet die Verwendung von **URSEC** auch eine Einsparung bei Desinfektionsmitteln und bringt dem Bettlägerigen einen unvergleichlichen Komfort.
- **URSEC** ist komfortabel und benutzerfreundlich für Bettlägerige, verbessert die Hygiene und vereinfacht die Arbeit des Pflegepersonals, Daher entscheiden sich kostenbewußte öffentliche und private Pflegeeinrichtungen für **URSEC**.